

1. Você está recebendo o kit para coleta de saliva.
2. Não utilizar se a embalagem estiver violada.
3. Abra o envelope bolha e reserve, pois este será utilizado para enviar a amostra após a coleta.

Componentes do kit:

. Embalagem



. Coletor



. Etiqueta de identificação Tismoo

NA: _____
NOME: _____
DATA DE NASC.: _____
DATA DA COLETA: _____

Oragene®, ORAcollect®, OMNIgene® e prepiT® são marcas registradas da DNA Genotek Inc. Patente (www.dnagenotek.com/LegalNotices)

PRECAUÇÕES: Cuidado ao inserir o chumaço de algodão na boca, risco de asfixia. Se o líquido estabilizador entrar em contato com os olhos ou a pele, enxague. **NÃO INGERIR.**


PROCEDIMENTO PARA COLETA DE SALIVA (SWAB):

O paciente **NÃO** pode comer, beber, fumar ou ingerir balas, pastilhas ou gomas de mascar 30 minutos antes da coleta.


1. Abra o kit e garanta que o chumaço de algodão **NÃO** toque em nenhuma superfície antes da coleta.



2. Coloque o chumaço de algodão confortavelmente na boca (2A) e esfregue a gengiva inferior (2B) por 10 vezes com movimentos para trás e para frente;

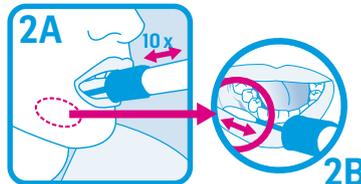


3. Repita este procedimento no lado oposto da boca da mesma maneira;

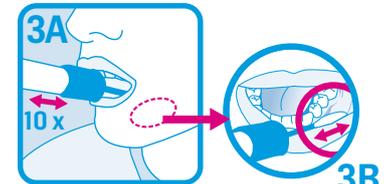

4. Mantenha o tubo em posição vertical e desenrosque a tampa do tubo;



5. Vire a tampa para baixo, insira o chumaço dentro do tubo e feche hermeticamente;

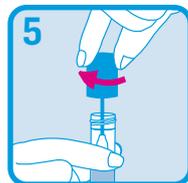

6. Inverta o tubo fechado com a tampa e agite vigorosamente por 15 vezes;



7. Identifique o tubo com a etiqueta enviada com o kit;

NA: _____
NOME: _____
DATA DE NASC.: _____
DATA DA COLETA: _____

PROCEDIMENTO PARA ENVIO DA AMOSTRA:

1. Coloque o tubo dentro do envelope bolha com o qual o kit foi enviado;
2. Envie o kit com a amostra coletada por correio expresso para o endereço ao lado seguindo as orientações de envio.

A amostra deverá ser transportada em temperatura ambiente. O material coletado permanece estável em temperatura ambiente por até 60 dias.

Dúvidas:

Tismoo Biotech Laboratório LTDA

Av. Brigadeiro Luís Antônio, 2503

2º andar - São Paulo - SP - Brasil

CEP: 01401-000

e-mail: info@tismoo.com.br

Telefones: 55 11 3541-1136 / 55 11 3251-1964

Celular: 55 11 95638-4178